

## BM-Check

# GEBRUIKERSHANDLEIDING


## 1 - Productpresentatie

Het magnetische ringoortje is een compact apparaat waarmee mensen zonder hoortoestel naar een ringleidingsysteem kunnen luisteren alsof ze een hoortoestel in de "T"-stand dragen.

Het kan gebruikt worden voor:

- Het controleren van de geluidsbron van een magnetische ring.
- Uitrusten van een persoon die hardhorend is en geen hoortoestel heeft.
- Uitrusten van een persoon met gehoorverlies wiens prothese geen "T" positie heeft.

## 2 - Onderdelen

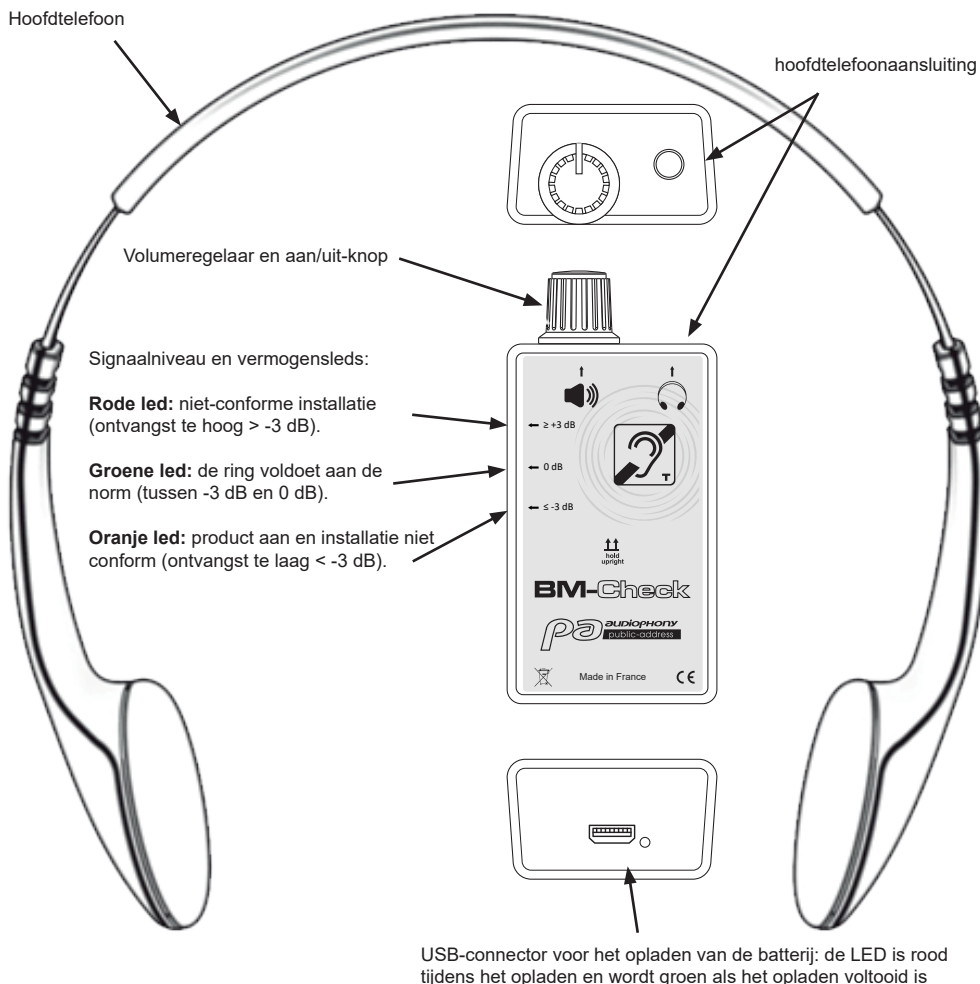

Opmerking: De BM-Check is een magnetische veldmeter die is goedgekeurd volgens de EN60118-4-norm.

### 3 - Werking

#### De ringleidingtester werkt op een interne batterij.

1. Plaats de headset op uw oren en stel hem zo af dat u comfortabel kunt luisteren.
2. Houd de ringleidingtester verticaal en op hoofdhoogte om de positie van een hoortoestel na te bootsen.



3. Schakel het apparaat in door de volumeregelaar iets naar rechts te draaien totdat een comfortabel luistergeluid wordt verkregen. Draai de knop in de tegenovergestelde richting om het volume zo nodig te verlagen.
4. Als de oranje led niet oplicht, controleer dan of de interne batterij correct is opgeladen.
5. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de headset, draait u de volumeregelaar linksom in totdat de led uitgaat.

#### Belangrijk

Schakel het apparaat altijd uit als het niet wordt gebruikt om de levensduur te verlengen.

Houd de ringleidingtester altijd op oorhoogte en rechtop als u naar een ringleidingsstelsel luistert om de best mogelijke prestatie te garanderen.

## 4 - Onderhoud

Voer de volgende handelingen regelmatig uit om de levensduur van het product te verlengen:

Reinig het apparaat met een zachte, droge doek of geschikte reinigingsdoekjes. Gebruik geen reinigingsmiddelen met oplosmiddelen en voorkom dat er allerlei vloeistoffen in de ringleidingstester terechtkomen.

Schakel de headset uit als u hem niet gebruikt.

Houd de batterij opgeladen.

## 5 - Probleemoplossing

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Handeling
De oranje led van de ontsteking brandt niet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De batterij is leeg.</li> <li>2. Er is een interne fout.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluit de tester aan op een USB-oplader.</li> <li>2. Neem contact op met uw dealer.</li> </ol>
De ringleidingstester hoort geen ringgeluid.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het geluid is niet luid genoeg.</li> <li>2. De tester bevindt zich niet op de juiste afstand om naar de ring te luisteren.</li> <li>3. De magnetische ring werkt niet.</li> <li>4. De hoofdtelefoon heeft een probleem.</li> <li>5. Interne fout.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verhoog het volume.</li> <li>2. Breng de ringleidingstester dichterbij de ringleiding.</li> <li>3. Gebruik een andere ringleidingstester of een ander luistersysteem (indien mogelijk) om te controleren of de ringleiding werkt. Als er geen geluid uit de ring komt, neem dan contact op met uw dealer.</li> <li>4. Vervang de hoofdtelefoon.</li> <li>5. Volg stap 3. Als het geluid te horen is met een ander apparaat, neem dan contact op met uw dealer om de ringleidingstester te vervangen.</li> </ol>

Omdat AUDIOPHONY® de uiterste zorg besteed aan haar producten om te verzekeren dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderworpen aan wijzigingen, zonder voorafgaande aankondiging. Daarom kunnen de technische specificaties en de fysieke configuratie van de producten afwijken van de illustraties.

Zorg ervoor dat u het laatste nieuws en updates krijgt over de AUDIOPHONY®-producten op [www.audiophony-pa.com](http://www.audiophony-pa.com).

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van **HITMUSIC S.A.S** - Parc d'activités Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANKRIJK