


Simulateur de prothèse pour amplificateur de boucle avec casque

pa **audiophony**
public-address

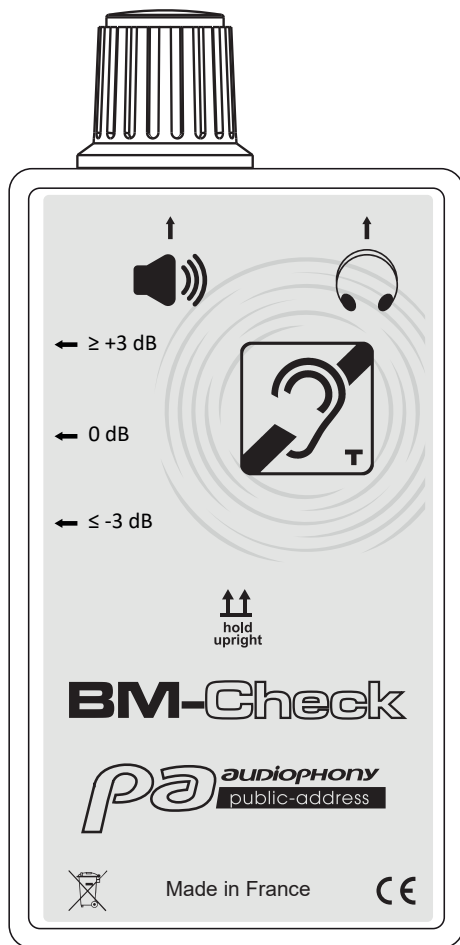

BM-Check

GUIDE DE L'UTILISATEUR

H11389 - Version 2 / 03-2023


1 - Présentation du produit

L'écouteur de boucle magnétique est un dispositif compact qui permet aux personnes non appareillées d'écouter un système de boucle magnétique comme s'ils portaient une aide auditive en position « T ».

Il peut être utilisé pour:

- Vérifier la source sonore d'une boucle magnétique
- Équiper une personne malentendante et non appareillée
- Équiper une personne malentendante dont la prothèse ne dispose pas de position « T ».

2 - Composants

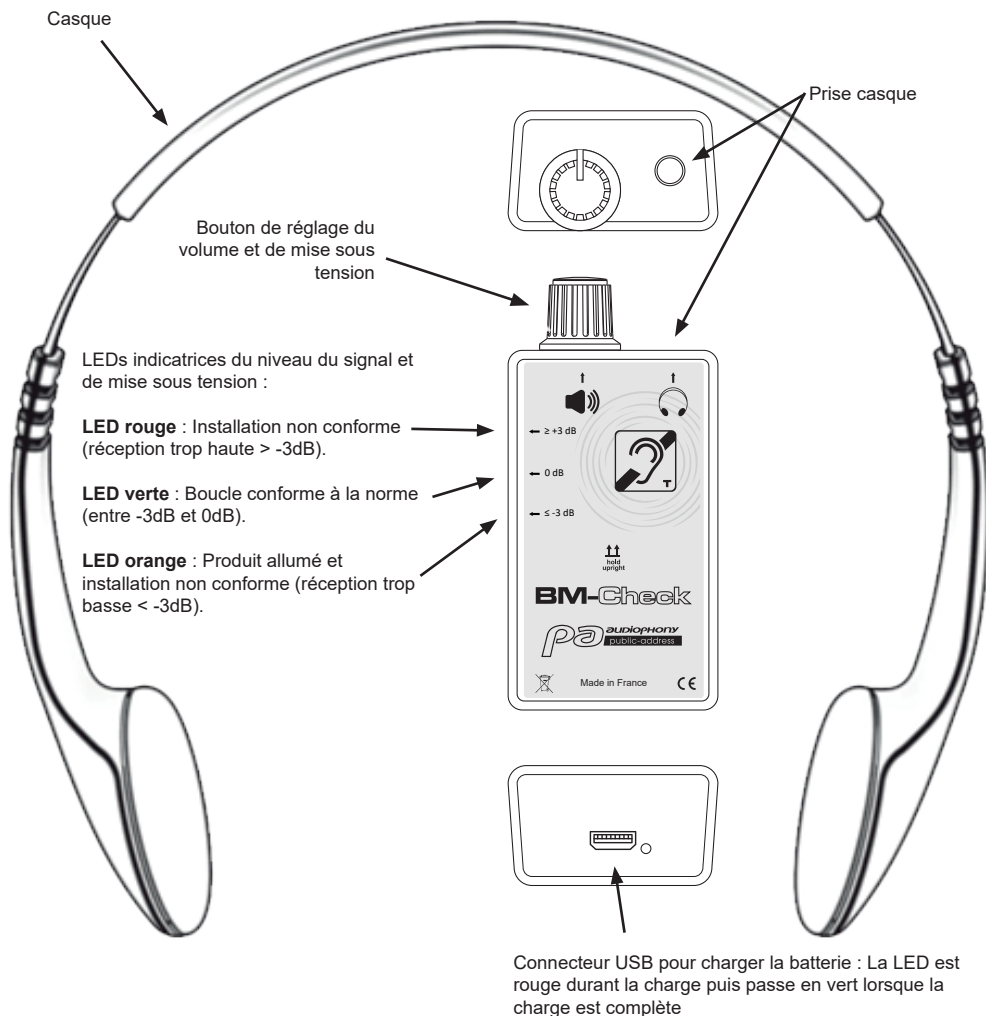

Note: Le BM-Check permet de faire une mise en service à la norme EN60118-4.

3 - Fonctionnement

Le testeur de boucle fonctionne avec une batterie intégrée.

1. Placez le casque sur vos oreilles et ajuster le pour obtenir une écoute confortable.
2. Tenez le testeur de boucle à la verticale et à hauteur de tête pour imiter la position d'une prothèse auditive.



3. Allumez l'appareil en tournant légèrement le bouton du volume dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir un son d'écoute confortable. Tournez le bouton en sens inverse pour baisser le volume au besoin.
4. Si la LED orange ne s'allume pas, vérifiez que la batterie soit correctement chargée.
5. Lorsque vous avez fini d'utiliser le testeur, tournez le bouton de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LED orange s'éteigne.

Important

Toujours éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour augmenter sa durée de vie.

Maintenez toujours le testeur à hauteur d'oreille et à la verticale lors de l'écoute d'un système de boucle pour garantir les meilleures performances possibles.

4 - Maintenance

Pour prolonger la durée de vie du produit, effectuez régulièrement les opérations suivantes:

Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et sec ou des lingettes nettoyantes adaptées. N'utilisez pas de nettoyant à base de solvant et éviter de faire rentrer toutes sortes de liquide dans l'écouteur.

Éteignez le testeur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Maintenez la batterie chargée.

5 - Dépannage

Symptôme	Défaut possible	Action
La LED orange d'allumage ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie est déchargée 2. Il y a un défaut interne 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raccordez le testeur à un chargeur USB 2. Contactez votre revendeur
Aucun son de la boucle n'est entendu dans l'écouteur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le son n'est pas assez élevé. 2. Le testeur n'est pas à une distance appropriée pour écouter la boucle. 3. La boucle magnétique ne fonctionne pas. 4. Le casque a un défaut. 5. Défaut interne. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Montez le volume. 2. Rapprochez le testeur de la boucle. 3. Utilisez un autre testeur de boucle ou système d'écoute (si possible) pour vous assurer que la boucle fonctionne. Si aucun son ne sort de la boucle, contactez votre revendeur. 4. Remplacez le casque d'écoute. 5. Suivez l'étape 3. Si le son est entendu avec un autre dispositif, contactez votre revendeur pour changer le testeur de boucle.

La société AUDIOPHONY® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits AUDIOPHONY® connectez-vous sur www.audiophony-pa.com

AUDIOPHONY® est une marque déposée par HITMUSIC S.A.S - Parc d'activités Cahors Sud - En teste - 46230 FONTANES - FRANCE